

Produktbeschreibung

Community-Maske, produziert nach dem chinesischen KN95-Standard. Die Mund-/Nasenmaske dient nicht als Ersatz für die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und ist ausschließlich als Behelfsmaske vorgesehen. Es gibt keinen Nachweis einer Schutzwirkung nach einschlägigen Standards wie z.B. FFP2/FFP3.

Materialzusammensetzung:

Filterschichten	Material	Gewicht
Außenlage	PP-Spinn-Vlies	50+50 g/m ²
Mittellage	PP-Meltblown-Vlies	25x25 g/m ²
Innenlage	PP-Spinn-Vlies	20 g/m ²
	Gesamt Gewicht	170 g/m ²

Beachten Sie bitte die nachstehenden Anwendungshinweise.

Anwendung

1. Hände vor Anwendung waschen bzw. desinfizieren
2. Maske aus der Verpackung entnehmen
3. Maske am Kinn ansetzen und mit Haltebändern hinter den Ohren fixieren
4. Nasenclip vorsichtig fixieren, so dass die Nase von der Maske umschlossen wird
5. Prüfen Sie, ob die Maske fest am Gesicht anliegt

ACHTUNG – DER NASENCLIP MUSS OBERHALB DER NASE SITZEN UND NACH AUSSEN ZEIGEN

Allgemeine Hinweise

Vermeiden Sie es während des Tragens die Maske anzufassen und zu verschieben.

Ziehen Sie die Maske nach Gebrauch nach schräg unten ab und vermeiden Sie, die Außenseite der Maske zu berühren.

Warnung

Nicht waschen - Nicht bügeln - Nicht in den Trockner geben - Nicht zur chemischen Reinigung geeignet
Importeur:

<p>Hersteller: Dongguan Huagang Co. Ltd. No. 78 Jinhe Road, Jinmei Village, Changping Town Dongguan City, Guangdong, China</p>	<p>Importeur: Jacob Jürgensen Papier und Zellstoff GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 9 22085 Hamburg Telefon: 040 / 227 05 154</p>
--	--