




ATEMSCHUTZFALTMASKE FFP2 / FFP3

Aufsetzanleitung

Schritt 1

Nehmen Sie die Atemschutzmaske aus der Verpackung, falten Sie diese auf und ziehen Sie die Bänder in beide Richtungen auseinander.

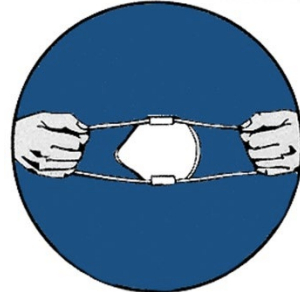

Schritt 2

Prüfen Sie die Maske optisch auf Beschädigungen. Legen Sie die Atemschutzmaske so in die Hand, das der Nasenbereich nach oben zeigt.



Schritt 3

Ziehen Sie das untere Band der Atemschutzmaske über den Kopf. Achten Sie darauf, dass sich das Band unter den Ohren befindet.



Schritt 4

Ziehen Sie nun das obere Band ebenfalls über den Kopf. Das Band sollte oberhalb der Ohren sitzen.



Schritt 5

Drücken Sie die Maske im Nasenbereich und am Kinn an. Atmen Sie tief ein. Sofern die Maske richtig sitzt, bewegt sich das Filtermaterial beim Einatmen.

