

Używanie zestawów SpillKits do rozlanych leków cytostatycznych

1



Zachowaj spokój!

2



Postępuj zgodnie z instrukcjami!

3




Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej Kategorie III!

4



Odgradzić miejsce wypadku i oznaczyć!

5

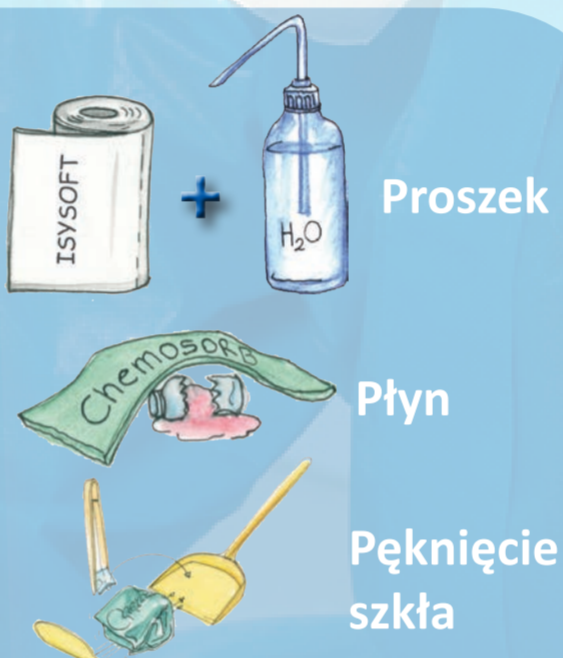


Proszek

Płyn

Pęknięcie szkła


Uwaga na formę czyszcząca!

6

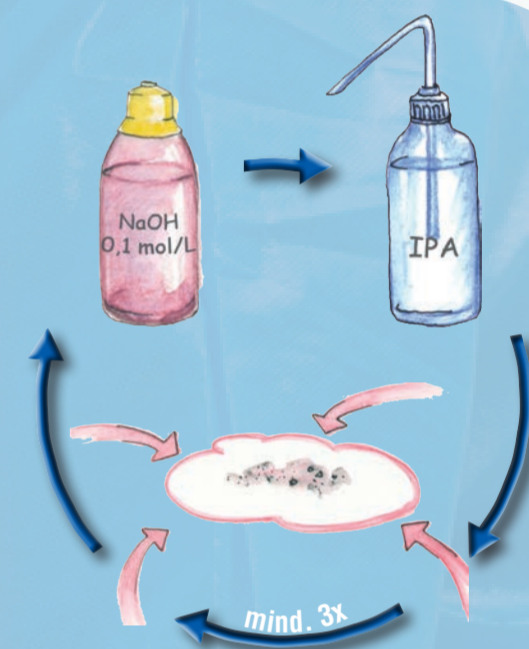


2-stopniowe czyszczenie!

7

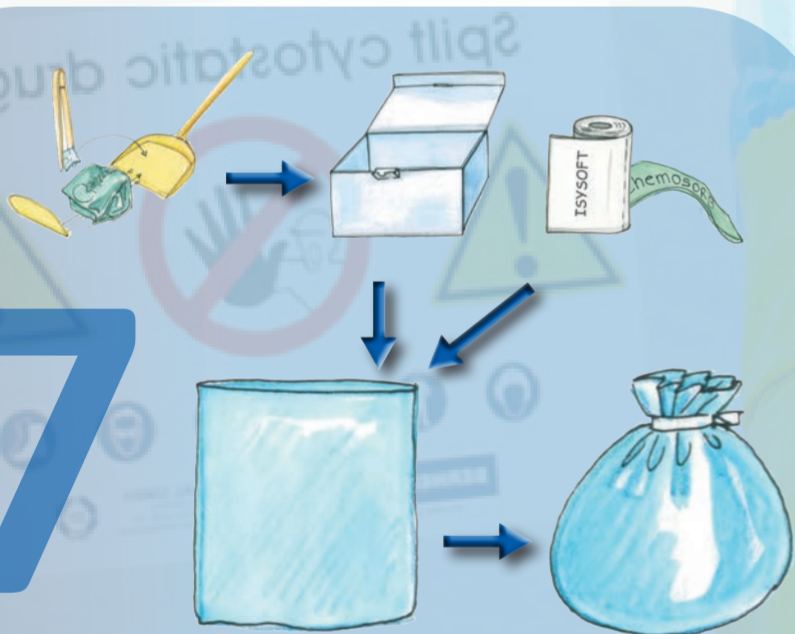

Wyrzucić śmieci do kosza!

8

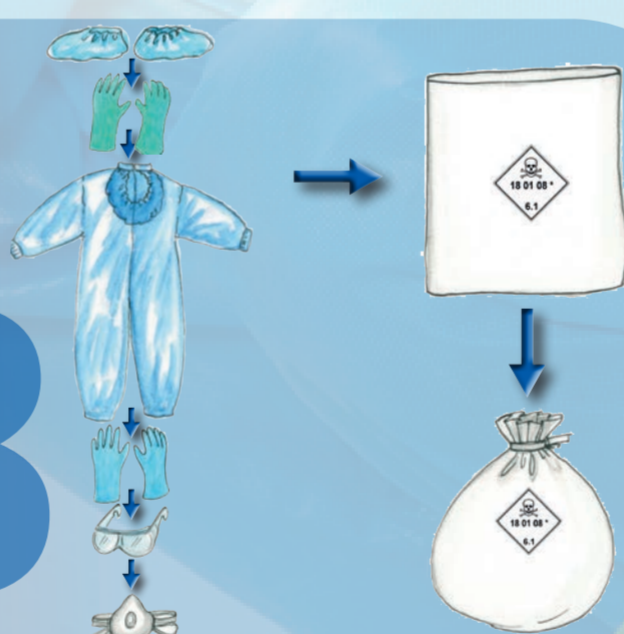

Worki na odpady i środki ochrony indywidualnej w worka na odpady niebezpieczne!

9



Prysznic dokładnie!

10



Udaj się do lekarza!

11



Udokumentuj incydent!

berner

Więcej informacji: Berner International GmbH
info@berner-safety.de • www.berner-safety.de
Tel.: +49 4121 4356-0 • Fax: +49 4121 4356-20