

Dökülen sitostatik ilaçlar için SpillKits kullanımı

1



Sakin olun!

2



Talimatları izleyin!

3



Uygun KKD kullanın
Kategori III!

4




Kaza bölgesini kordon
altına alın ve işaretleyin!

5




Temizleme kalıbına dikkat
edin!

6

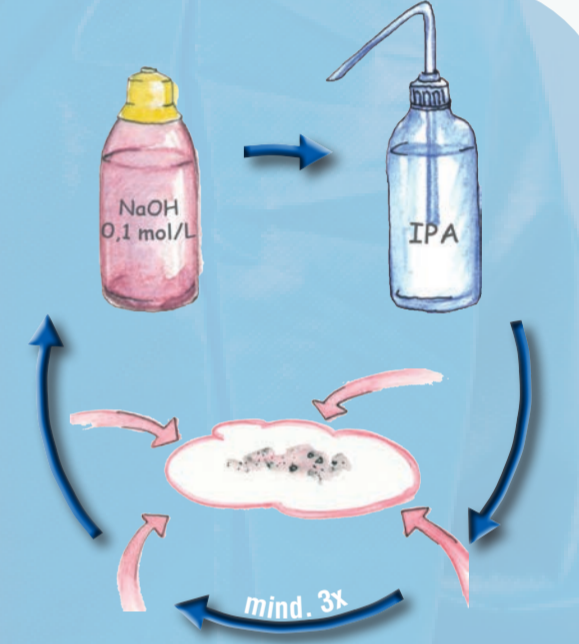

2 aşamalı temizlik!

7

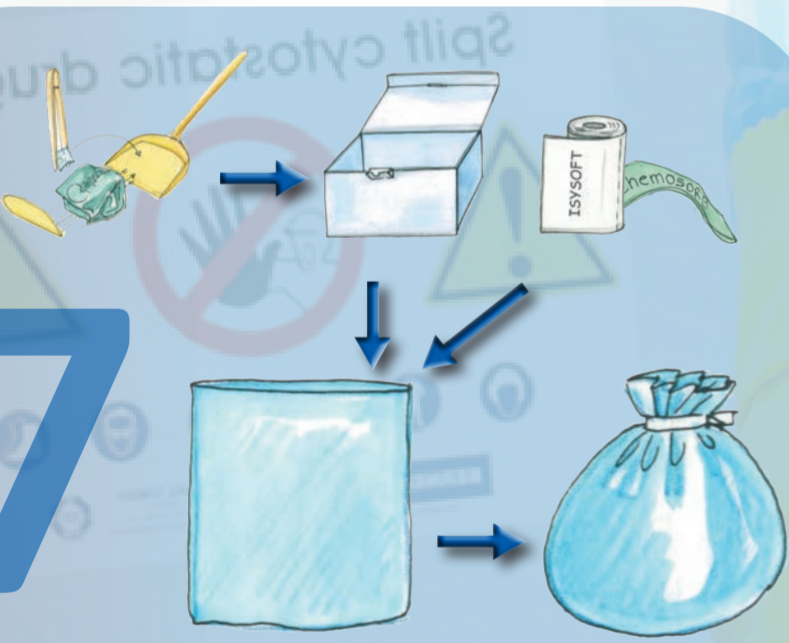

Çöpünü çöp kutusuna at!

8



Atık torbaları ve KKD
Tehlikeli atık torbası!

9



İyice bir duş al!

10



Bir doktora görünün!

11



Olayı belgeleyin!

berner

Daha fazla bilgi: Berner International GmbH
info@berner-safety.de • www.berner-safety.de
Tel.: +49 4121 4356-0 • Fax: +49 4121 4356-20